

Intensiv Proxoshape

Oszillierende diamantierte Feilen für den Abtrag von Überschüssen und Ausarbeitung von restaurierten Approximalflächen

Perfekt adaptierte und polierte proximale Füllungsflächen bzw. Kronenränder sind die Voraussetzung für die Gesunderhaltung des Parodonts und die Verhinderung von Sekundärkaries. Intensiv Proxoshape erfüllt die Anforderungen an eine korrekte Ausarbeitung der Füllungsflächen und -ränder und bereitet sie auf die Hochglanzpolitur vor.



Produktbeschreibung

Intensiv Proxoshape:

- 7 Feilen einseitig diamantiert in 6 Körnungen: 125, 90, 50, 40, 15 und 8 µm
- 4 Feilen mit verlängertem Arbeitsteil, 11 mm
- 1 distal diamantierte Spezialfeile, 3 mm, 15 µm

Intensiv Proxoshape Coarse:

- Einseitig diamantierte und perforierte Feile, 80 µm, 2 Reihen Loch-Perforation



FEILENSTÄRKE
0,2 mm

Alle Intensiv Proxoshape sind erhältlich in Packungen zu 3 oder 6 Stück

Intensiv Proxoshape Set, REF 100
Je 1 PS0, PS1, PS2, PS3


Indikationen

- Entfernung von: Füllungs- und Zementüberschüssen
- Ausarbeitung und Trimmen von: approximalen abstehenden Kronenrändern aus Gold oder Keramik
- Konturieren und Finieren von: approximalen Restaurationsoberflächen

Vorteile

- Vereinfachter Zugang zum Interdentalraum
- Keine iatrogene Schädigung der Nachbarzähne durch einseitige Diamantierung
- Vermeidung unruhiger Oberflächen (Wellenschliff), die durch die Anwendung rotierender Instrumente verursacht werden



01, 02) Universität Brescia, Italien
 03, 04) Dr. A. Devigus, Bülach, Schweiz

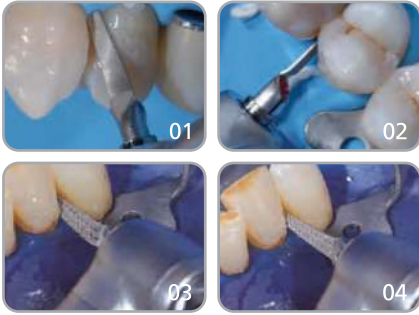

Klinische Abbildungen

- 01 Finieren der Restauration im approximalen Bereich mit Feile PS2
- 02 Bearbeiten der Zone unterhalb des rekonstruierten Kontaktpunktes ohne Beeinträchtigung des Nachbarzahnes mit Feile PS3
- 03 Modellieren mit PSC80
- 04 Modellieren mit PSC80

Farbcode	Mikron	Beschreibung
534	125 µm	Coarse
524	90 µm	Standard
524	80 µm	Medium
514	50 µm	Golden Burs GB
524	60 µm	Medium
514	40 µm	Fine
504	15 µm	Extra fine
494	8 µm	Ultra fine

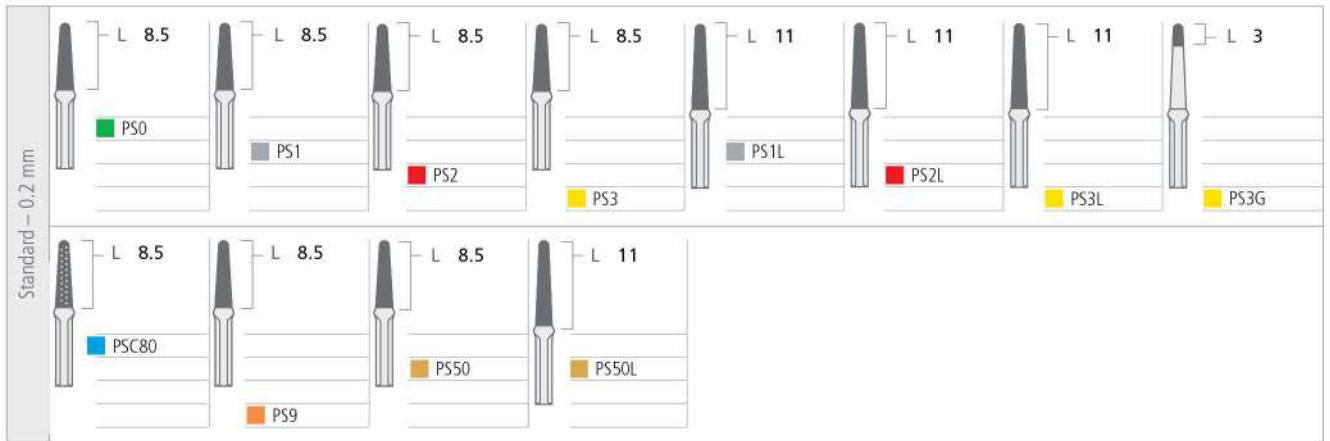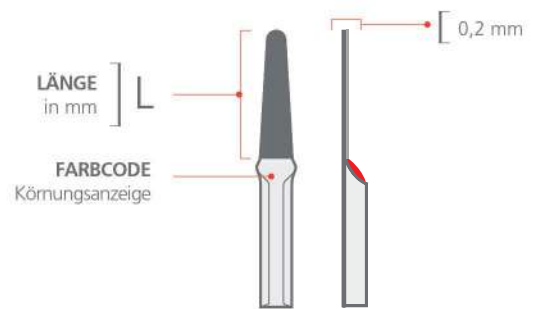

Intensiv Swingle® Pat. EP 2754406B1

Das einzigartige reziproke Winkelstück mit beiden Funktionen in einem Winkelstück: freidrehende axiale Rotation und fixierte axiale Position. Intensiv Swingle ist kalibriert für alle Intensiv mechanisch oszillierende Instrumente wie Intensiv Proxoshape, Bevelshape und Ortho-Strips. Das Intensiv Swingle entspricht einem "Typ EVA" Winkelstück, jedoch mit patentierter Dual-Funktion der Instrumenten-Positionen.

Siehe Seite 90