

Intensiv Swingle[®] Pat. EP 2754406B1

SWISS EDITION

Reziprokes Winkelstück mit mikromechanischer dualer Funktion (axial freidrehend / axial fixierte Position der oszillierenden Instrumente) -
Dauerhaft, veredelt und leistungsstark, inklusive zusätzlichem Servicepaket

Eine effiziente Nutzung eines reziproken Winkelstückes erfordert eine Wahl zwischen der axial fixierten Position und der freien axialen Rotation der oszillierenden Instrumente während derselben Behandlung. Intensiv Swingle SWISS EDITION mit griffsicherem Design und einer kratz- und abnutzungsresistenten Glas-Beschichtung. Diese Spezialbeschichtung schützt das Winkelstück dauerhaft gegen verkratzte Oberflächen.



REF WG-69LTSWISS
(mit Licht)

REF WG-69ASWISS
(ohne Licht)



Kippschalter nach unten fixiert: oszillierende Instrumente in axial fixierter Position
Kippschalter nach oben fixiert: oszillierende Instrumente axial freidrehend.

Produktbeschreibung


DAS DUAL-WINKELSTÜCK INTENSIV SWINGLE

- Griffsicheres Design des Winkelstückes
- Spezialbeschichtung schützt dauerhaft gegen verkratzte Oberflächen
- Reziprokes Winkelstück mit integriertem Wasserspray und optional Licht
- Hubbewegung 0,9 mm
- 20.000 oszillierende Hub-Bewegungen bei 40.000 U/Min
- Mit Kippschalter zur Wahl axial freidrehender oder fixierter Position der oszillierenden Instrumente

Ein Kippschalter am Winkelstückkopf lässt zwischen axial freidrehenden oder axial fixierten oszillierenden Instrumenten wählen.

Indikationen

- Swingle: für oszillierende Instrumente mit oszillierender Bewegung
- Swingle/Proxoshape: Präzise minimalinvasive Präparationen und Finitur der Füllungsänder
- Swingle/Proxoshape: Rasches und effizientes Entfernen von Überschüssen, Finieren und Polieren von Restaurationen
- Swingle/Ortho-Strips: Approximale Schmelzreduktion, ASR, in der Kieferorthopädie

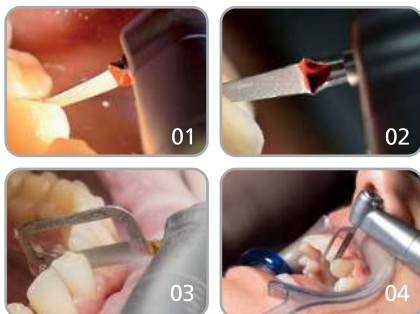

01-02) Dr. A. Devigus, Bülach, Schweiz
03-04) Dr. F. Garino, Torino, Italien

Vorteile

- Dauerhafte makellose Oberfläche des Winkelstückes dank der kratzfester und haltbarer Spezial-Beschichtung
- 20.000 Oszillationen pro Minute für eine bessere Schleif und Polierleistung
- 3-Jahres-Garantie einschliesslich einer Wartung

Klinische Abbildungen

- 01 Approximale Finitur mit Intensiv Swingle SWISS EDITION und Intensiv Proxoshape Flexible, rot, 40 µm
- 02 Finieren der Füllungsänder mit Intensiv Swingle SWISS EDITION und Intensiv Proxoshape Flexible, rot, 40 µm
- 03 Approximalkontakt-Öffnung mit Intensiv Swingle SWISS EDITION und Ortho-Strips Opener, orange, 8 µm
- 04 Approximale Schmelzreduktion mit Intensiv Swingle SWISS EDITION und Ortho-Strips Central, rot, 40 µm